



PLACE-IT Flexibele Laryngoscoop ME00-218

<https://mdsmedical.nl/place-it-flexibele-laryngoscoop-me00-218>

Specificaties

Productnummer	ME00-218
Categorie	Laryngectomie
Merk	Medex
Type	instrument
Artikelnummer	ME00-218
Verpakkingseenheid	stuk
Weergave op mdsmedical.nl	Nee

De PLACE-IT is een flexibele buis voorzien van 2 kunststof tips. Het werkuiteinde aan de distale zijde is voorzien van een venster aan de voorzijde en doorgang aan de onderzijde. De tip aan de proximale zijde van de buis is doorgankelijk en bestaat uit 2 delen. Door het bovenste deel te draaien wordt de tip verlengt of verkort in overeenstemming met de flexibele endoscoop.

Combinatieproducten

Voor dit instrument is geen specifiek systeemtoebehoren van MEDEX verkrijgbaar. De PLACE-IT kan veilig worden gebruikt in combinatie met flexibele endoscopen bestemd voor KNO van divers fabricaat.

Toepassing

De behandelend arts resp. de gebruiker is verantwoordelijk voor een juiste toepassing van de PLACE-IT.

Draai aan de dop om de lengte van de PLACE-IT af te stellen op het combinatie materiaal
Voer de PLACE-IT op in de keelholte en de proximale oesophagus met het venster gericht naar de gebruiker
Lokaliseer de punctieplaats op geleide van het doorschijnend licht
Maak een punctie met behulp van een naald van de achterwand van de trachea
Controleer de punctieplaats onder zicht van de PLACE-IT
Voer de TE-punctie uit met behulp van een secundaire punctieset via het venster van de PLACE-IT
Voer de ingebrachte veer tot de mond op onder continu endoscopisch zicht
Verwijder PLACE-IT nadat de veer uit het proximale uiteinde van de PLACE-IT komt

De patiënt is nu voorbereid voor >een secundaire TE-punctie.

Na afsluiting van de behandeling.

Voer PLACE-IT af conform ziekenhuis richtlijnen voor single use instrumentarium

Heeft u nog vragen over de PLACE-IT? Neem voor meer informatie contact op met onze Customer Service via 050-569 0038 of neem contact op met een van onze productspecialisten. U kunt elke vraag aan ons stellen. Wij staan voor u klaar.