

Uitzuigapparatuur & hulpmiddelen MDS Medical

Tracheoport uitzuigapparaat


De Tracheoport is eigendom van MDS Medical, u ontvangt deze in bruikleen. Hiervoor ondertekent u een bruikleenovereenkomst. MDS Medical declareert de kosten van het apparaat middels een huurovereenkomst met uw zorgverzekeraar.

Het apparaat en de onderdelen

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 1. Tracheoport uitzuigapparaat | (REF: 63600) |
| 2. Opvangbeker | (REF: 60601) |
| 3. Trachflow verbindings slang 28 cm | (REF: 60510) |
| 4. Trachflow verbindings slang 5 cm | (REF: 60520) |
| 5. Trachflow uitzuig slang | (REF: 60500 / 31117) |
| 6. Trachflow Fingertip | (REF: 60700-10) |
| 7. Uitzuigkatheter 25 cm | (Diverse maten, zie tabel) |
| 8. Primed Yankauer | (Diverse maten, zie tabel) |
| 9. Bacteriefilter | (REF: 60800) |
| 10. LuchtfILTER | (REF: 50000-07) |

Niet afgebeelde onderdelen:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Aansluitkabels met adapter 230V | (REF: 60602 / 60603) |
| Aansluitkabels met 12V auto-adapter | (REF: 60604) |

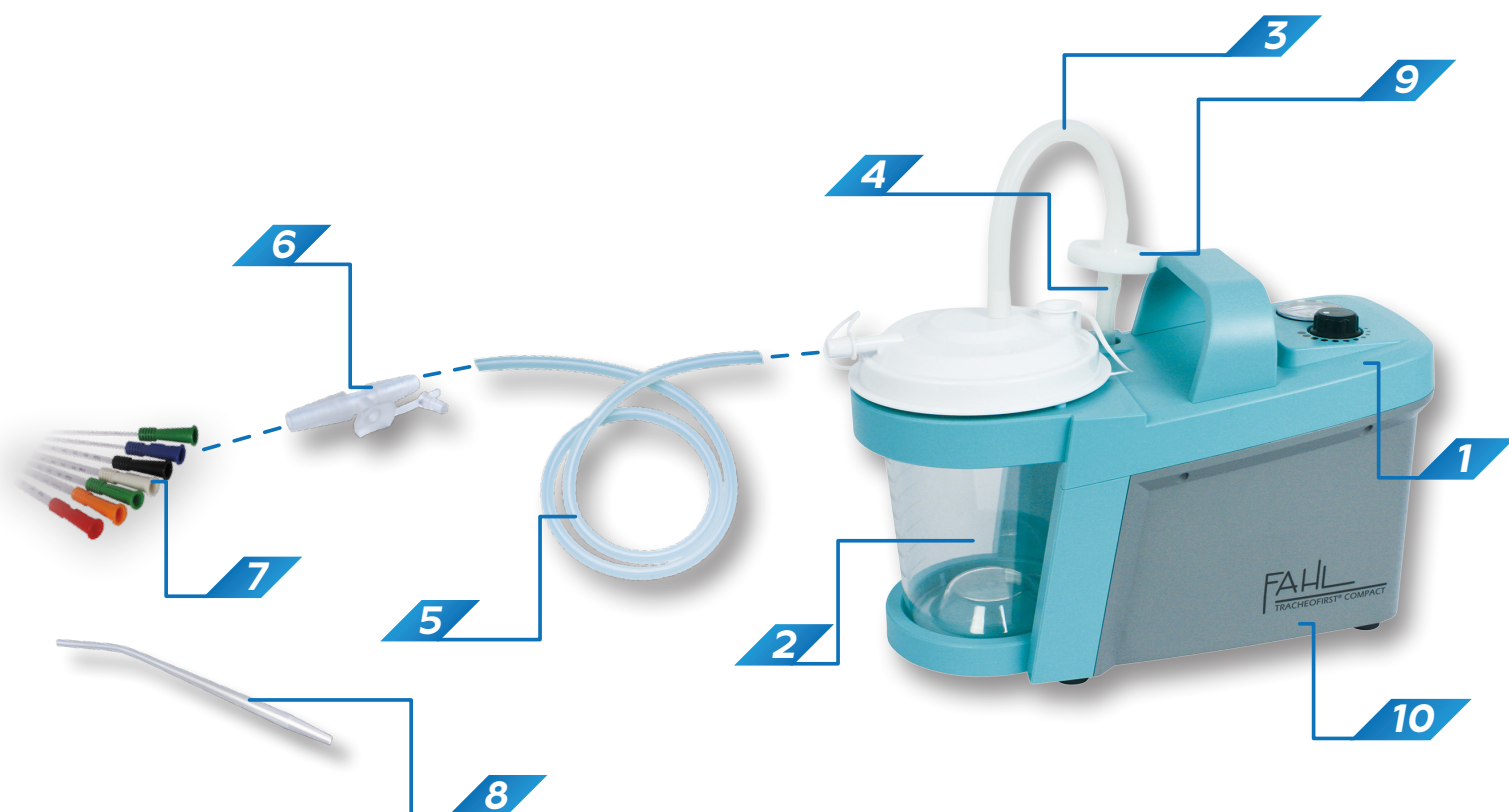

Gebruik van de Tracheoport

De Tracheoport is zeer gebruiksvriendelijk. Hieronder staan instructies en adviezen voor het reinigen en gebruiken van het apparaat en de onderdelen. Door deze op te volgen zorgt u er voor dat het apparaat schoon blijft en goed functioneert. Raadpleeg voor een gedetailleerde gebruiksaanwijzing de handleiding van het apparaat.

LET OP: Ledig de opvangbeker tijdig (maximaal tot 50% gevuld). Hiermee voorkomt u dat er slijm in het apparaat wordt gezogen.

Reiniging en onderhoud

Om goed functioneren en optimale hygiëne van uw uitzuigapparaat te garanderen dient u een aantal stappen te doorlopen.

Na ieder gebruik van het apparaat:

- Spoel de uitzuigslang (REF: 60500) met schoon water. Vul een beker of schoon glas met schoon water en zuig dit op met de Tracheoport.
- Ledig en reinig de opvangbeker (REF: 60601) en deksel in een sopje van handwarm water en een beetje afwasmiddel. Droog vervolgens beide onderdelen af en plaats deze terug op het apparaat. Let op dat er niets tussen het deksel en de opvangbeker komt bij het sluiten.
- Neem de pomp af met een schone lichtvochtige doek.

Wekelijks:

- Vervang de fingertip (REF: 60700-10).

Maandelijks:

- Vervang het luchtfilter (REF: 50000-07) en het bacteriefilter (REF: 60800).
- Vervang de uitzuigslang met fingertip (REF: 31117).

Iedere 3 maanden:

- Vervang de verbindingsslagen, bestaande uit de lange verbindingsslang (REF: 60510) en de korte verbindingsslang (REF: 60520).

Vervanging van onderdelen/hulpmiddelen

	Dagelijks	Wekelijks	Maandelijks	3-maandelijks	REF nr.
Uitzuigkatheter	x				zie tabel
Luchtfilter			x		50000-07
Bacteriefilter			x		60800
Uitzuigslang			x		31117
Verbindingsslang 28 cm				x	60510
Fingertip		x			60700-10
Verbindingsslang 5 cm				x	60520
Yankauer		x			zie tabel

LET OP: De Tracheoport-onderdelen zijn niet hittebestendig. Reinigen middels uitkoken is daarom niet wenselijk.

Uitzuigkatheters & Yankauers

Uitzuigkatheters		
Omschrijving	REF nr.	Verpakkingseenheid
Stomakatheter 25 cm CH 9 (blauw)	01906821	100 st.
Stomakatheter 25 cm CH 10 (zwart)	01906831	100 st.
Stomakatheter 25 cm CH 12 (wit)	01906841	100 st.
Stomakatheter 25 cm CH 14 (groen)	01906851	100 st.
Stomakatheter 25 cm CH 16 (oranje)	01906861	100 st.

Yankauers		
Omschrijving	REF nr.	Verpakkingseenheid
Primed Yankauer 4 mm	36107	1 st.
Primed Yankauer 6 mm	36101	1 st.
Primed Yankauer 8 mm	36103	1 st.
Primed Yankauer met fingertip 4 mm	36116	1 st.
Primed Yankauer met fingertip 8 mm	36113	1 st.

Troubleshooting

Troubleshooting		
Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat doet niets	<ul style="list-style-type: none"> De accu is leeg. De stekker zit niet goed in het stopcontact. Er heerst een vacuüm in de opvangbeker. 	<ul style="list-style-type: none"> Laad het apparaat op of gebruik de netstroomaansluiting. Controleer de aansluitingen in het stopcontact en het apparaat. Ontlucht de opvangbeker.
Het apparaat heeft onvoldoende zuigkracht	<ul style="list-style-type: none"> De accu is leeg. Het bacteriefilter is verstopt. Er is sprake van luchtlekkage in de verbindingsslangen. 	<ul style="list-style-type: none"> Laad het apparaat op of gebruik de netstroomaansluiting. Vervang het bacteriefilter. Controleer of de verbindingsslangen stevig zijn aangesloten.
Het apparaat geeft "te laag vacuüm" aan	<ul style="list-style-type: none"> Het bacteriefilter ontbreekt. Het deksel van de opvangbeker is niet goed gesloten, of het afdichtdopje zit er tussen. Er is sprake van luchtlekkage in de verbindingsslang(en). Er is bloed of secreet in het apparaat gezogen. 	<ul style="list-style-type: none"> Plaats een bacteriefilter. Controleer de sluiting van het deksel. Controleer of de verbindingsslangen juist zijn aangesloten op het apparaat / de opvangbeker. Neem contact op met MDS. Het apparaat dient te worden gerepareerd.
Het apparaat geeft "te hoog vacuüm" aan	<ul style="list-style-type: none"> Het bacteriefilter is verstopt. De vlotter van de overloopbeveiliging blokkeert de inlaat van het deksel. 	<ul style="list-style-type: none"> Vervang het bacteriefilter. Ledig en reinig de opvangbeker en reinig de vlotter.

Heeft u vragen?

Werd uw vraag op de vorige pagina niet beantwoord? Neem dan contact op met onze Customer Service, onze contactgegevens staan hieronder.

Spoed

Heeft u dringende problemen met uw apparaat en bieden bovenstaande tips geen oplossing? Neem dan het liefst zo snel mogelijk na constateren contact met ons op.

Wacht niet tot de avond of het weekend.

Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 - 17:00 uur. Wij kunnen u via de telefoon, WhatsApp of videocall helpen. Indien nodig wordt het apparaat omgewisseld.

Is er buiten kantooruren werkelijk sprake van spoed? Dan is de MDS-spoedlijn beschikbaar, uitsluitend voor problemen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag. Het nummer is: **050-569 0038**.

Bestellen van losse onderdelen

Wij werken zo duurzaam mogelijk; bestelt u daarom voor 1 à 2 maanden vooruit, dan grijpt u niet mis. Inventariseer voordat u bestelt welke onderdelen vervangen dienen te worden. Het overzicht binnenin deze brochure kan u daarbij helpen.

U kunt bij ons bestellen via telefoon, WhatsApp, e-mail en onze website (in het begin bij voorkeur telefonisch zodat wij u goed kunnen helpen).



Telefoon:
050 - 569 0038



E-mail:
orders@mdsbv.com



WhatsApp:
050 - 569 0038



Website:
www.mdsbv.com

Einde gebruik / inleveren van de apparatuur

Indien u het apparaat definitief niet meer nodig heeft, dient het te worden geretourneerd aan MDS. Na ontvangst beëindigen wij de huurovereenkomst met de zorgverzekeraar.

Wij vragen u om de volgende stappen te doorlopen:

- Neem contact op met de Customer Service van MDS via tel: 050-5690038 en meld uw retour.
- Verwijder de slangenset, de filters en het opvangreservoir. Deze gooit u weg.
- Maak het apparaat goed schoon.
- Verpak het apparaat samen met de handleiding en de aansluitkabels in de originele tas.
- Voeg een briefje bij uw retourzending met daarop de naam en geboortedatum van de gebruiker.
- Verpak het geheel (inclusief tas en omdoos) zorgvuldig in een doos en stuur deze kosteloos naar:

MDS B.V. Werkplaats Q.

Antwoordnummer 46

9750 VX Haren

- Wij kunnen het apparaat niet bij u ophalen i.v.m. hygiënevoorschriften. Alle apparaten worden de eerste 2 weken na ontvangst namelijk in quarantaine geplaatst.

Bij twijfel of het apparaat nog nodig zal zijn, of bij tijdelijk niet gebruik, is het raadzaam om deze een tijdje achter de hand te houden mocht u het apparaat toch weer nodig hebben. Denk hierbij aan het griepseizoen, verkoudheid of een luchtweginfectie. Heeft u het apparaat definitief niet meer nodig? Volg dan bovenstaande procedure.