

Laryvox Emergency-set Laryngectomie Pro

De Laryvox® Emergency-set is een complete set voor acute hulp in noodgevallen, bij beademing en zuurstoftoediening. De onderdelen zijn tevens los verkrijgbaar.

De meeste ambulances zijn niet uitgerust met specifieke hulpmiddelen voor beademing en zuurstoftoediening bij mensen met een tracheostoma. Helaas komt het nog regelmatig voor dat er zuurstof wordt toegediend via een neusbrilletje of met een los slangetje in het stoma. Met de Emergency-set in huis, onderweg of bijvoorbeeld op vakantie in de caravan bent u goed voorbereid en biedt u de hulpverlener de middelen om de beste zorg te kunnen bieden.

De eerste minuten zijn cruciaal. Met een speciaal beademingskapje voor op het stoma kan iedereen direct hulp verlenen in afwachting van de ambulance.

De Laryvox® Emergency-set draagt bij aan een snelle en efficiënte hulpverlening.

De Laryvox® Emergency-set bevat:



- **1 x Beademingsmasker met mondstuk met ventiel**
Maakt mond-op-stoma-beademing eenvoudiger. De klep voorkomt terugstromen van de ingeblazen lucht. Het mondstuk kan los van het masker geplaatst worden op een 15mm-aansluiting van een canule of m.b.v. de 15-22mm-adapter rechtstreeks op een stomapleister.
- **1 x Noodkaartje en deursticker**
Om aan te geven aan hulpverleners dat u door een stoma ademt.
- **1 x Tracheostomaspreider**
Hiermee wordt het tracheostoma op veilige wijze opgehouden.
- **5 x Comfort pleisters**
Ter bevestiging van een zuurstofadapter of HME bij patiënten die geen pleister of tube gebruiken.
- **1 x Canule met cuff voor actieve beademing**
Tracheotec Vario maat 7 met cuff voorzien van standaard ISO 15-mm aansluiting voor beademingsapparatuur.
- **1 x Zuurstofslangetje**
Aansluiting past op de zuurstofadapter.
- **1 x 15-22mm-adapter**
Koppelstukje tussen de 15- en 22mm-aansluitingen. Bijvoorbeeld tussen mondstuk en canule of mondstuk en pleister.
- **3 x Optifluid oliedoekjes**
Doekjes doordrenkt met een neutrale zachte olie voor het soepel inbrengen van een tracheacanule.
- **5 x Laryvox® O2-adapter**
Voor toediening van zuurstof. Past zowel op de 15mm-aansluiting van de canule als op een stomapleister (22mm)

Geleverd in een handzaam en opvallend koffertje

TIP: Voeg de MDS Flexibele HME Adapter met zuurstofaansluiting (REF 19888) toe aan uw Emergency-set.

Deze adapter past zowel op de standaard 15mm-aansluiting van een tracheacanule als op de standaard 22mm-aansluiting van een tube of pleister.

Maakt u gebruik van een pleister met een 23mm-aansluiting?

Bestel dan ook de MDS 23-22 Ring Adapter. (REF 19989)

MDS B.V.

Postbus 123
9750 AC Haren
Tel: 050 - 569 0038

IBAN: NL98ABNA0463832426
BTW#: NL852331307B01
KVK#: 56850638

Web: www.mdsmedical.nl
E-mail: info@mdsbv.com (customer service)
orders@mdsbv.com (orders)