

# Lekt uw stemprothese?



## Heeft u last van:

Hoesten tijdens of na het eten/drinken?

1. Vocht- of voedingsdeeltjes in het slijm?
2. Meer slijmvorming dan gebruikelijk?
3. Aanhoudende en terugkerende infecties aan de luchtwegen?



Als u op een van bovenstaande vragen JA kunt beantwoorden, dan is de kans aanwezig dat uw stemprothese lekt.

## Controleer uw stemprothese

### Lekkagetest:

1. Reinig uw stemprothese met behulp van een (scheer)spiegel en goede belichting.
2. Neem een slok van een drank met een contrasterende kleur. Bijvoorbeeld melk of koffie.
3. Controleer de stemprothese op lekkage **door** of **langs** de stemprothese.



Laat desgewenst een ander helpen/meekijken.



1. Reinig de stemprothese met behulp van een stemprotheseborstel en een flushing device. Volg de beschrijving in de handleiding.
2. Herhaal bovenstaande lekkagetest.

Neem contact op met uw behandelend arts en bespreek dat u geen lekkage heeft kunnen constateren, maar wel problemen ondervindt met uw stemprothese.



Het reinigen van uw stemprothese is afdoende gebleken. Reinig uw stemprothese minimaal tweemaal daags (na iedere maaltijd) om lekkage te voorkomen.

Plaats een afsluitplug in de stemprothese en neem contact op met uw arts voor een afspraak.

Neem contact op met uw arts voor een afspraak.

Plaats een afsluitplug in de stemprothese en herhaal de lekkagetest om lekkage langs de stemprothese aan te tonen of uit te sluiten.



Verwijder de afsluitplug en maak een afspraak met uw arts.

Maak een afspraak met uw arts en gebruik tot die tijd een afsluitplug als u eet of drinkt.

## Wat te doen bij (het vermoeden van) een lekkende stemprothese

Elke stemprothese gaat vroeg of laat lekken. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Het kan zijn dat de prothese aan vervanging toe is. Bij de één is dat na een maand, bij de ander pas na een half jaar. Deze verschillen kunnen worden veroorzaakt door onder andere schimmelvorming, maagzuur of medicatie. Hierdoor kan het materiaal van de stemprothese eerder worden aangetast. De stemprothese kan ook tijdelijk lekken omdat de klep wordt geblokkeerd door vervuiling zoals voedselresten, waardoor de klep niet volledig kan sluiten.

Het is daarom van belang dat er een "lekkagetest" wordt gedaan om te bepalen of de stemprothese echt lekt, en wat voor lekkage dit betreft: **door** of **langs** de stemprothese.

Op de achterzijde van dit blad wordt deze "Lekkagetest" stapsgewijs uitgelegd. Neemt u rustig de tijd voor deze test en vraag iemand anders om even met u mee te kijken.

In onderstaande tabel staan de genoemde artikelen overzichtelijk weergegeven zodat u eenvoudig de voor uw stemprothese geschikte hulpmiddelen kunt bestellen.

Blom-Singer / Laryvox Uniek Stemprothese		
REF	Omschrijving	Verpakkingseenheid
25800	Laryvox Plug (universeel)	1 st.
IN4070	Blom-Singer Plug 20Fr	1 st.
29110-08	Laryvox DuoBrush maat 8	Verp. 6 st.
29110-10	Laryvox DuoBrush maat 10	Verp. 6 st.
29110-12	Laryvox DuoBrush maat 12	Verp. 6 st.
69101	Laryvox Stomalight (past op DuoBrush)	1 st.
IN4050	Blom-Singer Flushing device	Verp. 3 st.

Provox stemprothese		
REF	Omschrijving	Verpakkingseenheid
7204	Provox Brush	Verp. 6 st.
8109	Provox Flush	1 st.
8139	Vega Plug	1 st.
69101	Laryvox Stomalight	1 st.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met onze Customer Service:

**Telefoon:** 050-569 0038 (ma t/m vr 8.30 – 17.00 uur)

**E-mail**

*Informatie en vragen:* [info@mdsbv.com](mailto:info@mdsbv.com)

*Bestellingen:* [orders@mdsbv.com](mailto:orders@mdsbv.com)

**Web:** [www.mdsmedical.nl](http://www.mdsmedical.nl)